

LEXAmed

ROLLSTÜHLE UND MEHR



**Gebrauchsanweisung
Leichtgewicht Rollator
ALADDIN
HMV-Nr. 10.50.04.1207**

CE

www.LEXA-med.de

Allgemeine Informationen

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den LEXAMED ALADDIN Leichtgewicht Rollator entschieden haben. Sie können sicher sein, dass Sie damit einen Rollator fahren, der den höchsten sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Die einfache Bedienung und die problemlosen und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten nach Ihren eigenen Bedürfnissen zeichnen den LEXAMED Rollator besonders aus.



Abb. 1

Inhalt

Vorwort.....	2
Übersicht des ALADDIN.....	2
Inhalt.....	3
Allgemeine Hinweise.....	4
Zweckbestimmung.....	4
Indikation.....	4
Kontraindikation.....	4
Nutzungsdauer.....	4
Verantwortlichkeit.....	4
Konformitätserklärung.....	5
Benutzung des ALADDIN.....	5
Auseinander- und Zusammenfalten.....	5
Laufen mit dem Rollator.....	6
Bremsen und Feststellbremsen.....	6
Der Rollator als Sitzgelegenheit.....	7
Tragen des Rollators.....	7
Einstellen des Rückengurtes.....	7
Einstellen der Schiebegriffhöhe.....	8
Reinigung und Desinfektion.....	8
Wiedereinsatz.....	8
Sicherheitshinweise.....	9
Übersicht des ALADDIN.....	10
Reparatur und Wartung für den Fachhandel.....	10
Entsorgung.....	10
Technische Daten.....	11
Garantie.....	12

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch, bevor Sie Ihren Rollator zum ersten Mal benutzen. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps für die richtige Benutzung und Pflege des Rollators. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, welcher Ihnen den ALADDIN Rollator verkauft hat. Er hilft Ihnen gerne weiter. Benutzen Sie den Rollator nur zu dem ihm zugeordneten Zweck!

Für den hier beschriebenen Rollator ist die Konformität gemäß EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte erklärt.

Zweckbestimmung

Der Rollator ALADDIN ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Er ist ausschließlich als Gehhilfe mit Sitzgelegenheit für eine Person gedacht. Die Beförderung von mehr als einer Person ist nicht erlaubt. Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr beim Sitzen) empfehlen wir das Modell Aladdin-D für Personen bis zu einer Körpergröße von 1,65m. Für größere Personen ist das Modell-H geeignet.

Indikation

Der Rollator ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, die noch über ausreichend Gehfähigkeit, Kraft und Standsicherheit verfügen, um mit Unterstützung des Rollators die Wohnung verlassen zu können.

Kontraindikationen

Die Verwendung des Rollators ist ungeeignet bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- Starke Gleichgewichtsstörungen
- Gliedmaßenverlust an den Armen
- Sitzunfähigkeit

Nutzungsdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des Rollators beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweisen bis zu 5 Jahre. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Rollator, sofern er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, weiter verwendet werden.

Verantwortlichkeit

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Rollators verantwortlich betrachten, wenn Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden der Rollator unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wird.

Konformitätserklärung

Die LEXAMED GmbH erklärt als Hersteller des Produktes, dass der Rollator ALADDIN den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG entspricht.

Benutzung des Rollators ALADDIN

Rollator auseinanderfalten

Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrtrichtung und betätigen Sie die Feststellbremse (Bremshebel nach unten).

Drücken Sie mit beiden Händen die Seitenrohre der Sitzfläche links und rechts nach unten bis der Klappmechanismus einrastet.



Rollator zusammenfalten

Nehmen Sie vor dem Falten des Rollators evtl. vorhandene Gegenstände aus der Tasche. Ziehen Sie die Entriegelungsschleife für den faltmechanismus auf dem Sitz nach oben. Der Rollator faltet sich automatisch zusammen. Haken Sie den Verriegelungsbügel ein.



Laufen mit dem Rollator

Erproben Sie die Benutzung des Rollators zuerst auf ebenen trockenen Boden. Lassen Sie sich nach Möglichkeit dabei begleiten. Üben Sie nach den ersten Versuchen, wenn Sie sich sicherer fühlen, anschließend die Verwendung auf abschüssigen Strecken. Achten Sie darauf, beim Bremsen immer beide Bremsen zu betätigen. Der Rollator würde sich sonst mit dem ungebremsten Rad um das gebremste Rad drehen und Sie könnten stürzen. Versuchen Sie Hindernisse auf Ihrem Weg immer zu umfahren. Bei Stufen suchen Sie eine Rampe, bei Treppen nehmen Sie den Aufzug. Sollte das nicht möglich sein, muss der Rollator über das Hindernis getragen werden. Suchen Sie sich dafür nach Möglichkeit die Hilfe einer zweiten Person.

Bremsen

Betriebsbremse (beim Schieben): Ziehen Sie den Bremshebel nach oben. Achtung! Die Bremsen sind nicht zum Dauerbetrieb als Schleifbremse geeignet.



Feststellbremse (beim Parken): Drücken Sie den Bremshebel nach unten. Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich, bei gelöster Bremse ohne Schleifgeräusche drehen lassen.



Der Rollator als Sitzgelegenheit

Ihr Rollator ist mit einer Sitzfläche und einer Rückenlehne ausgestattet. Die Sitzfläche ist nur zum Ausruhen. Adjustieren Sie den Rückengurt, sodass er beim Sitzen auf Taillenhöhe ist. Beim nach hinten Lehnen besteht Kippgefahr! Bevor Sie sich setzen, müssen Sie unbedingt die Feststellbremse anziehen. Der Rollator könnte sonst wegrollen und Sie könnten stürzen.



Einstellen des Rückengurtes

Der Rollator ist mit einem verstellbaren Rückengurt ausgestattet, der ein Anlehnen während des Sitzens ermöglicht. Adjustieren Sie den Rückengurt auf Taillenhöhe. Lösen Sie beide Feststellschrauben der Rückengurthalterungen und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Stellen Sie beide Rückengurthalterungen auf die gleiche Höhe ein. Bitte beachten Sie dass beim weiten nach hinten Lehnen Kippgefahr besteht!

Tragen des Rollators

Wenn Sie den Rollator tragen möchten, z.B. über ein Hindernis, klappen Sie ihn zusammen. Tragen Sie den Rollator an den Bügeln der Sitzfläche.

Einstellen der Schiebegriffhöhe

Die Höhe der Schiebegriffe des ALADDIN-D kann von 77cm bis 87cm, ALADDIN-H von 87cm bis 97cm eingestellt werden. Hierzu lösen Sie die Sternschrauben, bitte nicht ganz herausziehen. Ziehen Sie die Sternschrauben ein Stück heraus. Stellen Sie nun den Schiebegriff stufenweise auf die gewünschte Höhe (5 verschiedene Stufen) ein. Stellen Sie beide Schiebegriffe auf die gleiche Höhe ein. Achten Sie darauf, dass die Griffe einrasten, dann drehen Sie die Sternschrauben wieder fest.



Reinigung

Eine Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Verwenden Sie dafür eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie bitte keine Dampfstrahlgeräte und keine ätzenden Reinigungsmittel.

Wiedereinsatz

Nach einer gründlichen Reinigung und regelmäßiger Wartung durch den Sanitätsfachhandel kann der Rollator weitergegeben werden. Die Bedienungsanleitung ist ein fester Bestandteil und muss vor dem Wiedereinsatz unbedingt weitergegeben werden.

Sicherheitshinweise

Vor jeder Verwendung muss der Rollator auf Beschädigungen untersucht und die Bremsen auf ihre einwandfreie Funktion geprüft werden.

Der Rollator ist nicht für die Verwendung auf einer Rolltreppe geeignet (Sturzgefahr!)

Hängen Sie keine Taschen an die Griffe – Kippgefahr!
Benutzen Sie den Rollator nur auf festem und ebenen Untergrund.

Das maximale Benutzergewicht beträgt 120kg.
Die maximale Nutzlast der Tragetasche beträgt 5kg.
Der Rollator darf nicht zum Transport von Lasten verwendet werden.

Der Rollator kann platzsparend zusammengefaltet werden. Beachten Sie bitte, dass beim Zusammen- und Auseinanderfalten Klemmgefahr besteht.

Ziehen Sie zum Falten bzw. Entfalten des Rollators nicht an den Anbauteilen (Bremse, Räder, Tasche etc.) sondern immer am Gestänge des Rollators.

Nutzen Sie den Sitz des Rollators nur zum Ausruhen, nicht als Sessel (Kippgefahr!)

Wählen Sie das passende Modell des Rollators ALADDIN aus. Ihr Sanitätshaus berät Sie gerne welche Größe (D oder H) für Sie geeignet ist.

Wartungshinweise

Der Rollator sollte mindestens einmal im Jahr einer Inspektion durch den Fachhandel unterzogen werden. Bei Störungen oder Defekten am Rollator ist dieser unverzüglich dem Fachhändler zur Instandsetzung zu übergeben.

Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

Für Fragen steht Ihnen das LEXAmed Kundenservicetelefon unter 06324-87 39 300 zur Verfügung.

Entsorgung

Achten Sie auf die Umwelt und lassen Ihren Rollator sachgerecht entsorgen.

Wenn Ihr Rollator nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen über die Vorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Verwenden Sie bitte das beiliegende Wartungsprotokoll um den Wartungsstatus des Rollators im Überblick zu behalten.

ALLGEMEIN					BERKUNGEN
Der Rollator lässt sich leicht öffnen und falten					
Der Rollator fährt geradlinig					
Schiebegriffe nicht locker					
BREMSEN					
Reifen streifen nicht während der Fahrt					
Bremsen sind leicht zu betätigen					
Die Bremsen haben kein Spiel					
SITZ					
Sitz nicht locker					
RÄDER					
Kein seitliches Spiel					
Keine Risse im Belag					
RÜCKEN					
Rückenbespannung ist rissfrei					
Rückenbefestigung nicht locker					

G = geprüft, E = ersetzt, R = repariert

geprüft von:

Technische Daten

Breite.....	56cm
Länge.....	65cm
Sitzhöhe ALADDIN D.....	53cm
Schiebegriffhöhe verstellbar.....	77-87cm
Sitzhöhe ALADDIN H.....	60cm
Schiebegriffhöhe verstellbar.....	87-97cm
Sitzhöhe.....	53 o. 60cm
Sitzbreite.....	45cm
Breite gefaltet.....	16cm
Länge gefaltet.....	65cm
Gewicht.....	ca. 5,6kg
Maximale Belastbarkeit.....	120kg
Räder.....	8" Zoll EVA

Lieferumfang

Rollator ALADDIN
 Stockhalter
 Tasche mit Tragegurt
 Rückengurt
 Gebrauchsanweisung

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Von Garantie- und Produkthaftungsansprüchen sind Beschädigungen ausgeschlossen die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Desgleichen gilt beim Austausch oder Ersatz von Originalbauteilen der dem Original nachgebaute (kopierte) Teile, sowie bei der Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Garantie-Abschnitt

Produkt:

Seriennummer:

Fachhändler:

Datum und Stempel:



LEXAmed GmbH
Rudolf-Diesel-Str.15 • 67454 Haßloch
Tel.06324-8739300 • Fax9114525
info@lexa-med.de www.lexa-med.de

